


LOW-PROFILE GUIDE KIT

Per una corretta selezione del pilastro implantare

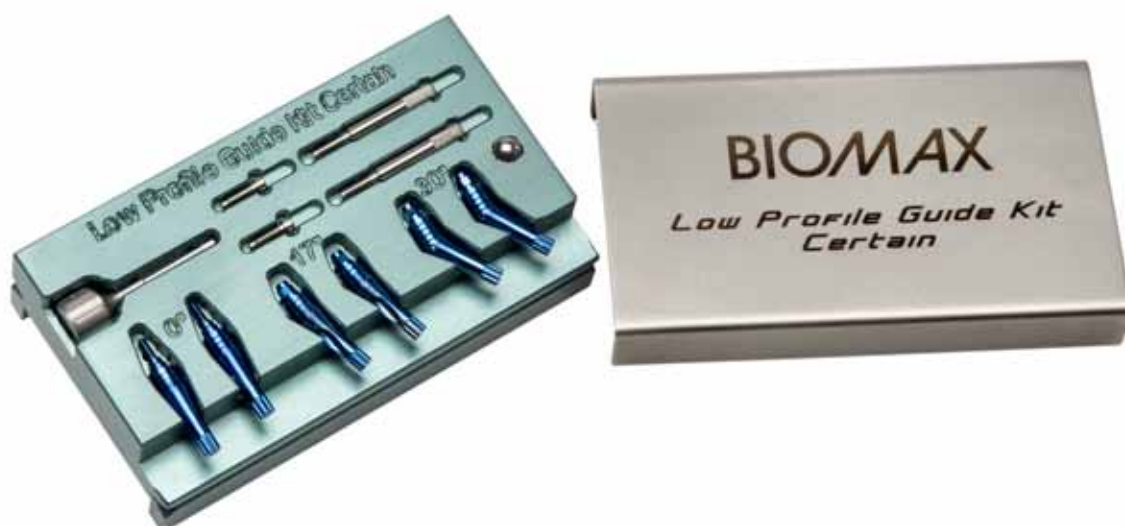

Il kit **LOW PROFILE GUIDE** è uno strumento di grande utilità nelle procedure cliniche di carico immediato e nelle procedure di laboratorio per il carico differito. Il **LOW PROFILE GUIDE KIT** aiuta il clinico e l'odontotecnico a selezionare il pilastro *Low Profile* con l'angolazione e l'altezza più corrette per il caso specifico, senza dovere impiegare i pilastri reali.

Il kit è disponibile sia per la connessione *Certain*[®] che per l'esagono esterno e contiene 3 coppie di repliche di pilastri *Low Profile*: dritti, angolati a 17° e a 30°, realizzati in titanio (piattaforma 4,1 mm). Montando le repliche direttamente sul paziente o sul modello sarà

possibile scegliere l'inclinazione più adatta, in rapporto all'antagonista e alla protesi che si vorrà realizzare, mentre le basi graduate in mm consentiranno di scegliere il pilastro con l'altezza transmucosa più adatta.

Le repliche diritte sono realizzate in un unico pezzo per facilitarne l'utilizzo, mentre quelle angolate possono essere avvitate a seconda delle preferenze con una vite corta o lunga. Il kit, perfettamente autoclavabile con le repliche, contiene, insieme alle viti, anche un apposito cacciavite che lo rende assolutamente completo.

Repliche LOW PROFILE GUIDE



CONNESSIONE ESAGONO ESTERNO



REPLICA LOW PROFILE 0°	TLP4100
REPLICA LOW PROFILE 17°	TLP4117
REPLICA LOW PROFILE 30°	TLP4130



REPLICA 0° REPLICA 17° REPLICA 30°

KIT LOW PROFILE GUIDE *esagono esterno*

TLPKIT



contiene:
 2 repliche TLP4100
 2 repliche TLP4117
 2 repliche TLP4130
 2 viti corte VTTM
 2 viti lunghe CCIV
 1 driver UNID12



CONNESSIONE INTERNA Certain®



REPLICA LOW PROFILE 0°	ITLP4100
REPLICA LOW PROFILE 17°	ITLP4117
REPLICA LOW PROFILE 30°	ITLP4130



REPLICA 0° REPLICA 17° REPLICA 30°

KIT LOW PROFILE GUIDE *Certain®*

ITLPKIT



contiene:
 2 repliche ITLP4100
 2 repliche ITLP4117
 2 repliche ITLP4130
 2 viti corte IVTTM
 2 viti lunghe ICCIV
 1 driver UNID12



*"L'impiego del **Low Profile Guide Kit** è di grande aiuto per una corretta selezione del pilastro implantare nei pazienti che si sottopongono alle procedure per la realizzazione del Columbus Bridge Protocol. Le repliche dei pilastri Low Profile rendono più semplice la scelta del pilastro corretto, evitando di aprire e risterilizzare diversi pilastri reali. Il foro presente su*

ognuna delle repliche (per assicurarle al di fuori del cavo orale) ne consente l'impiego in sicurezza anche nelle situazioni meno agevoli. Inoltre conoscere il tipo di pilastro che si userà per correggere l'angolazione dell'impianto è utile anche dal punto di vista chirurgico, per il posizionamento degli impianti successivi."